


Qualitätsgesicherte Praxishygiene



pluradent

engagiert
wegweisend
partnerschaftlich

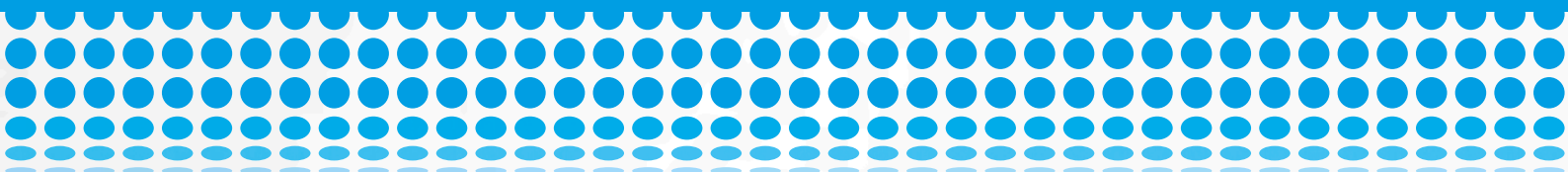

Inhalt

- 03 Qualitätsgesicherte Praxishygiene
- 04 Hygiene-Kreislauf
- 05 Kreislauf Instrumentenaufbereitung
- 06 Veranstaltungshinweise
- 07 Wasseraufbereitung
- 08 Reinigen und Pflegen
- 10 Instrumentenpakete
- 11 Infektionsprävention für Patient und Behandlungsteam
- 15 Instrumentenaufbereitung in der Zahnarztpraxis
- 20 Möbel und Zubehör
- 21 Dokumentation von Hygieneprozessen
- 23 prodent consult-Qualitätsmanagement
- 24 Literaturhinweise
- 25 Faxantwort
- 26 Pluradent in Ihrer Nähe

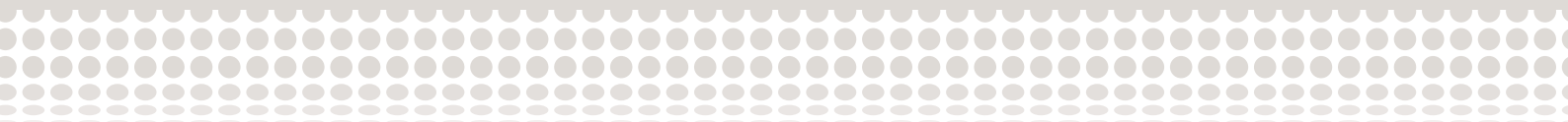

Qualitätsgesicherte Praxishygiene

Vom funktionierenden Hygienemanagement zum strukturierten Qualitätsmanagement sind es nur noch wenige Schritte.

Die Praxishygiene in zahnärztlichen Einrichtungen ist Bestandteil des Qualitätsmanagements und eng verknüpft mit der Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften. Im Fokus beider Themenkomplexe stehen die Sicherung und Verbesserung der Patientenversorgung und Praxisorganisation durch strukturierte, dokumentierte und reproduzierbare Arbeitsabläufe.

Unter Berücksichtigung Ihres individuellen Praxiskonzeptes unterstützt Sie Pluradent bei der Entwicklung und Umsetzung eines Hygienekonzeptes als wesentlicher Baustein Ihres Qualitätsmanagementsystems. Unser Anspruch ist die ganzheitliche Berücksichtigung Ihrer Praxisprozesse, die im Rahmen Ihrer Strategie auch künftigen Entwicklungen Raum bietet.




Hygiene-Kreislauf

Hygienemanagement stellt für die zahnärztliche Praxis eine Selbstverständlichkeit dar und begegnet dem Praxisteam in sämtlichen Bereichen der täglichen Arbeit.

Häufig sind die Hygienebestimmungen bekannt, jedoch besteht Unsicherheit in der Umsetzung oder Beurteilung der Vollständigkeit und Rechtssicherheit des eigenen Hygienekonzepts. Dies vor allem dadurch, dass es der Individualität der jeweiligen Praxisgegebenheiten anzupassen ist.

Vertrauen Sie den Erfahrungen der Pluradent-Experten. Wir unterstützen Sie bei der Integration Ihres Hygienekonzepts als wichtigen Baustein Ihres Qualitätsmanagements!

- Sicherheit in der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (IfSG, MPG, MPBetreibV, RKI, etc.)
- Entwicklung und Umsetzung Ihres individuellen Hygieneplans
- Abstimmung der geforderten Dokumentationserfordernisse
- Minimierung des Verwaltungsaufwands zur Ressourcenschonung mit Hilfe von Arbeitsanweisungen und Checklisten

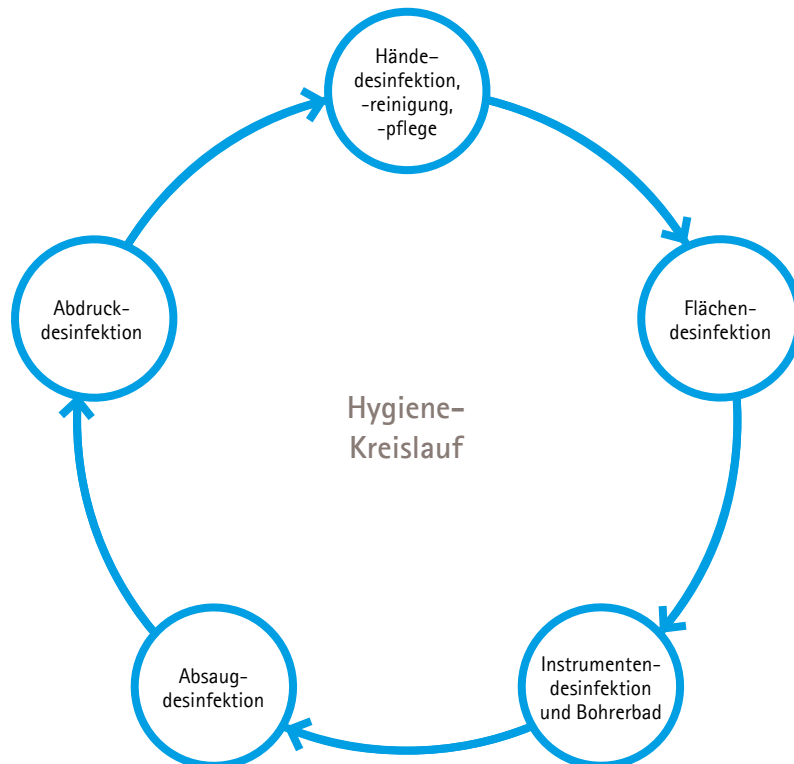

Veranstaltungshinweise

Hygiene- management

Informationen aus erster Hand für Zahnärzte und Praxisteam. Der Pluradent Hygiene-Spezialist Werner Sell bringt Sie auf den aktuellen Stand eines modernen Hygienemanagements. Nutzen Sie seine praktischen Erfahrungen für die Umsetzung in Ihrer Praxis.

Aus seinem Vortrag:

- **Dokumentation:** Nicht dokumentiert gilt als nicht gemacht. Dokumentation aller Arbeitsprozesse bis zur Freigabe des Sterilgutes.
- **Rechtliche Aspekte:** Umkehr der Beweislast. Wie erfolgt die richtige Aufbereitung nach MPG, RKI und DIN 17664 nach Herstellerangaben. Richtlinien für Praxisbegehungen und

Vorgaben der Landesgesundheitsämter und spezielle Landesgesetze für die Instrumentenaufbereitung.

- **Infektionsrisiken und Übertragungswege:** Maßnahmen nach der Behandlung eines Patienten. Vermeidung von Kreuzkontaminationen speziell bei kritisch B Instrumenten. Richtiger Einsatz und korrekte Dosierung von Desinfektionsmittel. Schutz und Pflege von Haut und Händen.
- **Korrekte Abläufe:** Räumliche Voraussetzungen reiner und unreiner Seiten.
- **Problemfälle Absaugung und Amalgamabscheider:** Was ist Refluxverhinderung?
- **Wie werden Fehler bei der Desinfektion und Pflege vermieden?**

Referent:

Herr Werner Sell, Hygiene-Spezialist, Pluradent

Termine:

15.09. Mannheim	17.09. Osnabrück
22.09. Homburg	29.09. Freiburg
01.10. Dresden	06.10. Stuttgart
08.10. Berlin	13.10. Konstanz
20.10. Ulm	22.10. Karlsruhe
27.10. Kempten	

Punktebewertung:

Entsprechend der Vorgaben und Empfehlungen der BZÄK/DGZMK werden 4 Punkte angerechnet.

Informationen:

Nähere Infos erhalten Sie bei **Herrn Werner Sparka** unter:
Tel. 07 21/86 05 240
E-Mail werner.sparka@pluradent.de

Hygienetag

Der Pluradent Hygiene-Tag richtet sich an Praxisinhaber und das für die Durchführung und Dokumentation verantwortliche Personal. Die Teilnehmer werden in fünf Vorträgen ausführlich über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen an das Hygienemanagement und die Aufbereitung von Medizinprodukten informiert.

Das fachkundige Referententeam stellt sich gern Ihren Fragen und gibt Tipps und Empfehlungen für Ihre individuelle Praxissituation.

Intensiv wird auf die Themen

- Grundlagen der Hygiene
- Sterilisation und Dokumentation
- Personalschutz
- Hygienemaßnahmen bei Geräten und Behandlungseinheiten
- Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken und Instrumenten eingegangen.

Die begleitende Ausstellung namhafter Hersteller bietet Ihnen zusätzlich einen umfassenden Überblick über Hygieneprodukte.

Referenten:

Die einzelnen Vorträge werden von wechselnden Experten aus dem jeweiligen Fachgebiet gehalten.

Termine:

08.09. Offenbach	08.09. Magdeburg
25.08. Hannover	29.09. Bremen
27.10. Braunschweig	24.11. Dortmund
24.11. Berlin	01.12. Osnabrück

Punktebewertung:

Entsprechend der Vorgaben und Empfehlungen der BZÄK/DGZMK werden 4 Punkte angerechnet.

Informationen:

Nähere Infos erhalten Sie bei **Frau Bettina Nienstedt** unter:
Tel. 05 31/2 42 38 10
E-Mail bettina.nienstedt@pluradent.de

Wasseraufbereitung

Für die Bereitstellung qualitativ einwandfreien Wassers in der Praxis ist eine effiziente Trinkwasseraufbereitung unerlässlich. Im Fokus stehen dabei Problemfelder wie die mögliche Verkeimung, Verschmutzung und Verkalkung. Diese lassen sich durch eine regelmäßige Wartung der Hausinstallation, der Geräte in der Wasserstrecke sowie durch Sicherheitsmaßnahmen von vornherein vermeiden.

Durch die Verwendung demineralisierten Wassers werden Sterilisationsgeräte und Instrumente geschont. Für Ihre dentalen Geräte bedeutet dies eine längere Lebensdauer und geringere Instandsetzungskosten.

LisaDem 32, W&H

Reines Wasser für optimale Ergebnisse



LisaDem 32 wird an das Leitungswassernetz angeschlossen und liefert zuverlässig demineralisiertes Wasser. Durch die zusätzliche Ausstattung mit einer Sprühpistole können weitere Geräte manuell befüllt, oder Instrumente vor der Sterilisation gespült werden.

- kompaktes Tischgerät
- konform mit EN 1717
- direkter Abfluss des gebrauchten Wassers möglich


€ 520,-

NitraDem Direkt Connect, Sirona

Demineralisiertes Wasser direkt aus der Quelle

Im direkten Anschluss an das Leitungswassernetz überwacht das Wasseraufbereitungssystem NitraDem laufend die Qualität des demineralisierten Wassers.

- direkter Wasseranschluss
- einfache Handhabung
- konstante Kontrolle

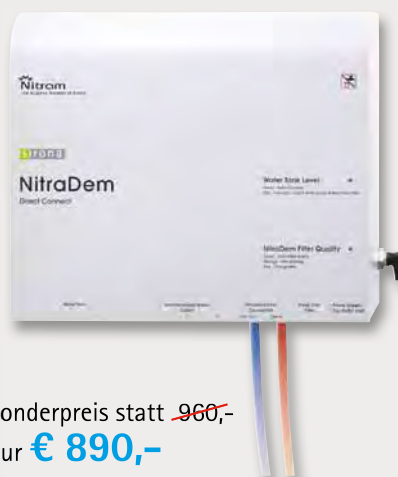

Sonderpreis statt ~~960,-~~
nur € 890,-



MELAdem 40, Melag

Nach dem Ionenaustauschprinzip werden dem Leitungswasser Ionen entzogen und durch Wasserstoff- und Hydroxidionen ersetzt. So liefert MELAdem 40 hochwertiges demineralisiertes Wasser.

- direkt an Melag-Autoklaven der Premium-, Profiklasse, Vacuquick und S-Klasse anschließbar
- Maße: 32cm (B) x 15cm (T) x 35cm (H)

Sonderpreis statt ~~365,-~~
nur € 315,-

Reinigen und Pflegen

Der hygienisch-fachgerechten Aufbereitung von Medizinprodukten kommt im Sinne des Infektionsschutzes große, auch juristische Bedeutung zu.



Hygojet, Dürr Dental Abdruckreinigung

- in Verbindung mit MD 520 werden alle wichtigen Abformmaterialien desinfiziert und gereinigt
- auch geeignet für Prothesen, Brücken, Kronen, korrosionsfeste Artikulatoren
- geschlossenes System, dient als Desinfektionsschleuse
- verhindert Kreuzinfektionen
- geprüftes Desinfektionsverfahren

Aktion:

Beim Kauf eines Hygojet Gerätes erhalten Sie 4 Flaschen à 2,5l MD 520 (Art.-Nr. 41137) im Gesamtwert von **€ 119,80 inklusive.**

~~1.520,-~~
€ 1.379,-

QUATTROcare 2104 A +, KaVo

Beste Pflege für Ihre Instrumente

Der Werterhalt Ihrer Instrumente liegt uns am Herzen. Nur durch optimale Reinigung kann gewährleistet werden, dass Sie lange Freude an Ihrem wertvollen Instrumentarium haben.

Pflegen Sie bis zu vier Instrumente auf einmal mit dem Pflegesystem QUATTROcare in weniger als einer Minute!

- Basisgerät mit Druckluftanschluss
- 1 Multiflex-Pflegekupplung
- 3 INTRAMatic-Pflegekupplungen
- 1 QUATTROcare-Spraydose

Art.-Nr. 200351 Anthrazit

Art.-Nr. 70689 Mint

Sonderpreis statt ~~2.985,-~~
nur **€ 1.895,-**



Assistina 301 plus, W&H

Luftbetriebenes Pflegegerät für Übertragungsinstrumente und Turbinen

- verlängert deren Lebensdauer
- verhindert das Überölen
- hohe Wirtschaftlichkeit
- filtert den Aerosolnebel und gibt saubere Luft ab

Art.-Nr. 86982
inkl. Reinigungs- und Pflegeset

Sonderpreis statt ~~1.180,-~~
nur **€ 995,-**



Sonorex RK 102 H, Bandelin

Hochleistungs-Ultraschallgerät



- hartverchromte Edelstahl-Schwingwanne für 3 Liter Inhalt mit Ablauf zur leichten Entleerung
- Edelstahlgehäuse, tropfwassergeschützt
- Heizung von 30° bis 80°C stufenlos regelbar
- Schaltuhr 1-15 Minuten oder Dauerbetrieb
- 3 Jahre Langzeitgarantie
- 50% mehr Ultraschallleistung

Art.-Nr. 86035

€ 635,- (ohne Zubehör)

Elmasonic Denta Pro H, Elma

Innovatives Ultraschall-Reinigungsgerät

- mit vordefinierten Reinigungsprogrammen
- Wegfall von lästigen Parametereinstellungen wie Zeit, Temperatur, Sweep, Degas
- mehr Komfort für den Anwender
- standardisierte Arbeitsprozesse
- Extra-Taste für besonders starke Verschmutzungen
- maximales Füllvolumen 2,75 Liter

Exklusiv-Angebot:

Elmasonic Denta Pro H
Korb, Deckel, Lochdeckel,
2 x Becherglas,
1 l Elma clean 10.

Art.-Nr. 203074

~~575,-~~
€ 525,-



Instrumentenpakete

INTRA compact, KaVo



25 LHC
(Übersetzungswinkelstück 1:5),
Art.-Nr. 18678
statt ~~1.268,-~~
nur **€ 854,-**



2068 LHC
(Winkelstück 1:1),
Art.-Nr. 18674
statt ~~861,-~~
nur **€ 599,-**



0767 LHC
(Reduzier-Winkelstück 5,4:1),
Art.-Nr. 18676
statt ~~936,-~~
nur **€ 664,-**



660 B
(Druckknopfspannzange
mit Licht),
Art.-Nr. 18989
statt ~~1.096,-~~
nur **€ 734,-**

T1 Classic, Sirona



S 200 L (1:5)
Art.-Nr. 35916
statt ~~1.440,-~~
nur **€ 998,-**



S 40 L (1:1)
Art.-Nr. 35917
statt ~~990,-~~
nur **€ 725,-**



S 6 L (6:1)
Art.-Nr. 35918
statt ~~1.050,-~~
nur **€ 767,-**



T1 Control Turbine
für Sirona,
Art.-Nr. 66679
statt ~~1.280,-~~
nur **€ 898,-**

Alegria, W&H



WE-99 LED G
(1:4,5, LED-Licht, 3-fach Spray),
Art.-Nr. 47388
statt ~~945,-~~
nur **€ 799,-**



WE-56 LED G
(1:1, LED-Licht, 1-fach Spray),
Art.-Nr. 47391
statt ~~695,-~~
nur **€ 590,-**



WE-66 LED G
(4:1, LED-Licht, 1-fach Spray),
Art.-Nr. 47512
statt ~~760,-~~
nur **€ 645,-**

Angebot:

Aktions-SET V
bestehend aus WE-99 LED G,
WE-56 LED G und WE-66 LED G
statt ~~2.034,-~~
nur **€ 1.900,-**

Angebot:

Aktions-SET I
bestehend aus 25 LHC, 2068 LHC
und 0767 LHC statt ~~2.117,-~~
nur **€ 1.999,-**

Aktions-SET II
bestehend aus 660 B, 2068 LHC
und 0767 LHC statt ~~1.997,-~~
nur **€ 1.879,-**

Angebot:

Aktions-SET III
bestehend aus S 200 L, S 40 L
und S 6 L statt ~~2.490,-~~
nur **€ 2.365,-**

Aktions-SET IV
bestehend aus T1 Control Turbine,
S 40 L und S 6 L statt ~~2.390,-~~
nur **€ 2.265,-**

Tip:

Weitere Instrumentensonder-
preise erfragen Sie bitte bei Ihrem
Pluradent Fachberater.

Infektionsprävention für Patient und Behandlungsteam

Aktion 10 + 1:

Wählen Sie 11 Produkte aus dem Pluradent-Qualitätsmarken-Sortiment und wir **schenken Ihnen das günstigste Produkt.**

Händehygiene

Die Händehygiene dient sowohl dem Schutz des Patienten als auch dem Schutz des Behandlungsteams. So gehört zum allgemeinen Hygieneverständnis neben dem Händewaschen auch eine Händedes-

infektion vor und am Ende jeder Behandlung, bei einer Behandlungsunterbrechung, sowie einem Handschuhwechsel.

Schutzhandschuhe vermindern die Infektionsgefährdung der Haut des Behandlers mit Blut oder Sekreten des Patienten. Wichtiges Kriterium ist hier neben der Reißfestigkeit auch der Allergieschutz (durch proteinarme Handschuhe, etc.).

Ihr Pluradent Fachberater stellt Ihnen gerne das komplette Produktsortiment der Pluradent Qualitätsmarke für den Bereich Hygiene vor.

Händedesinfektion, Pluradent

- frei von Farbstoffen und Parfümölen
- breites Wirkspektrum
- auch für Kühlumschläge geeignet

Gebinde	Art.-Nr.	Preis	ab 5 Flaschen	ab 3 Kanister
1 l Flasche	38764	€ 7,50	€ 6,90	–
5 l Kanister	68017	€ 34,50	–	€ 32,50



Tip:

Bitte beachten Sie die vorgeschriebene Einwirkzeit des Desinfektionsmittels!

Latex Plus puderfrei, Pluradent

- puderfrei, unsteril
- mikrogeraute Handfläche
- aus Naturlatex mit extrem niedrigem Proteingehalt

Größen	Art.-Nr.	100 Stück-Packung
Größe 6 x-klein	20084	€ 7,95
Größe 7 klein	20085	ab 10 Packungen € 6,95
Größe 7 1/2 mittel	20086	ab 50 Packungen € 5,95
Größe 8 1/2 groß	20087	
Größe 9 1/2 x-groß	20088	



Ultragrip Handschuhe puderfrei, Pluradent

- puderfrei, unsteril
- sehr weich, extra griffig
- mikrogeraute Handfläche
- aus Naturlatex mit reduziertem Proteingehalt

Größen	Art.-Nr.	100 Stück-Packung
Größe 6 x-klein	20071	€ 8,40
Größe 7 klein	20072	ab 10 Packungen € 7,40
Größe 7 1/2 mittel	20073	
Größe 8 1/2 groß	20074	ab 50 Packungen € 6,40
Größe 9 1/2 x-groß	20075	



Mund- und Nasenschutz

Aerosole sowie Blut- und Sekretspritzer stellen durch die möglicherweise darin enthaltenen Mikroorganismen eine Infektionsgefahr dar. Hiervor schützt ein geeigneter Mund- und Nasenschutz.

Schutzbrillen sollten möglichst auch über eine seitliche Abdeckung verfügen. Sie werden nach Kontamination mit geeigneten Desinfektionsmitteln gereinigt.

Tipp:

Bitte achten Sie darauf, dass der Mund- und Nasenschutz dicht anliegt!

Aktion 10 + 1:

Wählen Sie 11 Produkte aus dem Pluradent-Qualitätsmarken-Sortiment und wir **schenken Ihnen das günstigste Produkt.**

OP-Maske B, Pluradent

- zum Binden
- mit Drahteinlage für optimale Passform
- glasfaserfrei, Filterleistung 98%

Farbe	Art.-Nr.
Grün	20482
Weiss	20503
Blau	30387



50 Stück-Packung ab 5 Packungen ab 10 Packungen
€ 7,45 € 6,95 € 6,45

OP-Maske non Latex, Pluradent

- latexfreier Mundschutz mit eingearbeitetem Nasenbügel für optimale Passform
- 3-faches, glasfaserfreies Filtermedium
- Bakterienfilterleistung 98%
- mit weichen hautfreundlichen Gummibändern



Farbe	Art.-Nr.
Grün	20510
Weiss	20545
Blau	30388

50 Stück-Karton
€ 7,95
 ab 5 Kartons
€ 7,60
 ab 10 Kartons
€ 7,25

OP-Maske G, Pluradent

- mit Gummizug
- mit Drahteinlage für optimale Passform
- glasfaserfrei, Filterleistung 98%

Farbe	Art.-Nr.
Grün	20463
Weiss	20477
Blau	30386



50 Stück-Packung ab 5 Packungen ab 10 Packungen
€ 7,45 € 6,95 € 6,45

Flächenwisch- desinfektion, Pluradent

- für Medizinprodukte, medizinisches Inventar und Fußböden
- Konzentrat, aldehyd- und phenolfrei
- breites Wirkspektrum
- Einwirkzeit: 1% - 30 Minuten

Verpackung	Art.-Nr.	Stück	ab 3 Kanister
2 l Flasche	68014	€ 20,95	-
5 l Kanister	68015	€ 38,95	€ 36,95



Flächendesinfektion

Die Reinigung der Oberflächen von Einrichtungsgegenständen und medizinisch-technischen Geräten ist abhängig von deren Beschaffenheit.

Es wird empfohlen die durch Kontakt oder Aerosol verunreinigten, patientennahen Oberflächen (im Greifbereich) nach der Behandlung eines jeden Patienten zu desinfizieren.

Gezielte Maßnahmen sind bei sichtbaren Verunreinigungen mit potentiell infektiösen Sekreten erforderlich. Alle Desinfektionsmaßnahmen sind als Wischdesinfektion durchzuführen.

Sprühdesinfektion/ Schnelldesinfektion AF lemon, Pluradent

- gebrauchsfertig, aldehyd- und phenolfrei
- breites Wirkspektrum
- kurze Einwirkzeit (ab 1 Minute)

Verpackung	Duftnote	Art.-Nr.	Stück	ab 3 Kanister
1 l Flasche inkl. Sprühkopf	Lemon	200888	€ 9,95	-
1 l Flasche inkl. Sprühkopf	Neutral	68018	€ 9,95	-
5 l Kanister	Lemon	200889	€ 28,50	€ 25,50
5 l Kanister	Neutral	68019	€ 28,50	€ 25,50
Schaum-sprühkopf		200229	€ 3,90	-



Wischtücher, Pluradent

- Spenderbehälter zur Befüllung mit Pluradent Wischtüchern in Kombination mit gebrauchsfertigen Desinfektionsflüssigkeiten
- extra große, besonders reißfeste Tücher (31 x 31 cm)

Verpackung	Art.-Nr.	Stück
1 Rolle à 90 Blatt	201545	€ 11,50
Karton mit 6 Rollen à 90 Blatt	90433	€ 64,90
Feuchttuchspender	90434	€ 9,90



Desinfektionstücher, Pluradent

- breites Wirkspektrum
- kurze Einwirkzeit (ab 1 Minute)
- aldehyd- und phenolfrei, gute Hautverträglichkeit

Verpackung	Duftnote	Art.-Nr.	Stück	ab 3 Pckg.
Spenderdose mit 150 Tüchern	Lemon	200886	€ 6,30	€ 5,80
Spenderdose mit 150 Tüchern	Neutral	84926	€ 6,30	€ 5,80
Nachfüllpackung, 6 x 150 Tücher	Lemon	200887	€ 28,95	€ 26,95
Nachfüllpackung, 6 x 150 Tücher	Neutral	84927	€ 28,95	€ 26,95



Instrumentendesinfektion

Aktion 10 + 1:

Wählen Sie 11 Produkte aus dem Pluradent-Qualitätsmarken-Sortiment und wir schenken Ihnen das günstigste Produkt.

Desinfektionswanne

- Füllvolumen 4 Liter
- mit Siebeinsatz
- extra verschließbarer Schlitz im Deckel
- für alle gängigen Desinfektionslösungen geeignet

Größe	Art.-Nr.	Stück
4 Liter Volumen	25490	€ 45,80



Instrumentenbad, Pluradent

- breites Wirkspektrum
- Einwirkzeit: 2% - 30 Min.
- zur Verwendung im Ultraschallbad geeignet (3% - 5 Min.)
- frischer Duft

Verpackung	Art.-Nr.	Stück
2 l Flasche	68021	€ 26,90
5 l Kanister	68022	€ 52,50



Bohrerbad, Pluradent

- gebrauchsfertig, aldehyd- und phenolfrei
- breites Wirkspektrum
- mit Korrosionsschutz
- Einwirkzeit: 30 Min.
- geeignet für Ultraschallbad

(nicht geeignet für alkali- und alkoholempfindliche Kunststoffe, sowie Aluminiumteile und Instrumente, die mit Kunstharzkleber verarbeitet sind)

Verpackung	Art.-Nr.	Stück	ab 2 Kanister
2 l Flasche	68023	€ 11,95	–
5 l Kanister	68026	€ 25,90	€ 23,40



Pluradent-Qualitätsprodukte:

Alle Produkte der Pluradent Desinfektionslinie sind DGHM/VAH gelistet

Orange Solvent, Pluradent

- Reiniger für Instrumente in Praxis und Labor
- entfernt Reste von Abdruckmassen, reinigt Edelstahlteile
- gebrauchsfertig
- Inhaltsstoffe: Orange- und Citrusterpene, med. Weißöl

Verpackung	Art.-Nr.	Stück	ab 3 Stück
500 ml Flasche	84490	€ 9,50	€ 8,50



Handreinigungsbürste

- mit Bügel, autoklavierbar

Art.-Nr.	Stück
20081	€ 3,95



Instrumentenaufbereitung in der Zahnarztpraxis

Die Aufbereitung von Instrumenten ist sicherlich der zentrale Baustein in der Praxishygiene. Hier bilden neben dem Rahmen-Hygieneplan der BZÄK, in Zusammenarbeit mit dem DAHZ, die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts, die Grundlage für den Infektionsschutz in der Zahnarztpraxis. Als oberste Instanz für die Infektionsschutz-Richtlinien im deutschen Gesundheitswesen kommt gerade den RKI-Empfehlungen eine besondere Bedeutung zu.

Diese beschreiben in Normen, Klassifizierungen und Risikobewertungen die Sterilisations- und Reinigungsverfahren, welche dokumentiert mit reproduzierbaren Verfahren nach anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen haben.

Weitere Informationen zur Infektionsprävention und Instrumentenaufbereitung erhalten Sie von Ihrem Fachberater sowie unseren Hygienespezialisten.

Angebot:

Thermodesinfektor G 7881 AW, Miele inkl. eines Starterpakets nach Wahl im Wert von € 50,-

~~4.530,-~~
€ 4.040,-

Thermodesinfektor G 7881 AW, Miele



Die elektronische Steuerung Multitronic Novo Plus überwacht die hygienische Reinigung und Desinfektion der Praxisinstrumente auf 2 Stauräumebenen. Hierbei können auch Hohlkörperinstrumente über ein Injektorsystem wiederaufbereitet werden.

- DIN EN ISO 15883
- Spülraum und Wasserführung aus Edelstahl
- Serielle Schnittstelle RS 232 für die Dokumentation der Leistungsparameter mittels Drucker oder PC

Melatherm 10, Melag

Der Thermodesinfektor Melatherm 10 sorgt in 6 Arbeitsschritten vollautomatisch für eine effiziente Reinigung und Desinfektion Ihrer Instrumente.

Im serienmäßig gelieferten Basiskorb können neben Wasch- oder Siebtrays über eine Injektorschiene auch bis zu 11 Instrumente mit Hohlräumen hygienisch gereinigt und desinfiziert werden.

- als Unterbaugerät integrationsfähig in bereits vorhandene Schrankzeilen
- validiertes Gerät nach DIN EN ISO 15883
- flexible automatische Dokumentationslösungen

Sonderpreis statt ~~5.395,-~~
nur € 4.850,-
(ohne Zubehör)



Vacuclav 31B+, Melag

Das fraktionierte Vor-Vakuumverfahren des Autoklaven sorgt für eine hohe Hygienesicherheit. Bereits nach 15 Minuten stehen unverpackte Instrumente trocken und hygienisch für die erneute Nutzung zur Verfügung.

- Fassungsvermögen 5 Tablett 29 x 19 cm
- Schnell-B-Programm für die Sterilisation und Trocknung verpackter Instrumente in 25 Minuten
- Dokumentation über die Schnittstellen MELAflash, MELAview, MELAssoft oder den Protokoll-drucker MELAprint

~~8.070,-~~
€ 5.650,-



Angebot:

Melag Vacuclav 31B+
inkl. 5 Tablett,
(MELAControl PRO und
MELAflash CF-Card-Printer
inkl. CF-Card)

Vacuquick 13B, Melag

Der Vacuquick vereint die Eigenschaften eines Klasse-B-Autoklaven mit denen eines Schnell-Autoklaven. Im Schnell-S-Programm stellt er **unverpackte Instrumente bereits nach 7 Minuten sterilisiert** für die Weiterverwendung zur Verfügung. Durch die kompakten Geräteabmessungen passt das Gerät auch in ältere Schranksysteme.

- Schnellsterilisator
- automat. Wassernachspeisung bei Anschluss an eine Wasser-Aufbereitungs-Anlage
- intuitive Bedienung über großes Display
- vielseitige Dokumentationslösungen (Netzwerk, CF-Card, Drucker)

Sonderpreis
statt ~~6.166,-~~
nur € 4.180,-
inkl. 4 Tablett



Vacuklav 40-B, Melag

Das tiefe Vakuum des Klasse B-Autoklaven sichert eine optimale Sterilisation und Trocknung auch verpackter Materialien und Textilien. Dank des Schnellprogramms können unverpackte/verpackte Instrumente bereits nach 10 Minuten/17 Minuten dem Gerät trocken entnommen werden.

- Fassungsvermögen 6 Tablett
- Dokumentation über eingebauten CF-Slot

Sonderpreis statt
~~9.001,-~~
nur € 6.790,-



Lisa 517, W&H

Der Klasse B-Sterilisator bietet dank der intelligenten Lisa Software ein Höchstmaß an hygienischer Sicherheit, auch bei verkürzten Zyklen kleiner Ladegut-Chargen. Zusätzlich sorgen die neuartige Vakuumpumpe und das 2CS-compact-System für einen wirtschaftlichen Betrieb.

- Service erst nach 4.000 Zyklen erforderlich, dadurch besonders wirtschaftlich
- sehr leise durch patentiertes Wassertrennsystem
- neue Software verfügbar

~~6.890,-~~
€ 5.990,-

Angebot:

W&H Lisa 517
Premiumpaket inkl.
• 5 Tablett,
• Helix-Test



Container-Kassette, Hu-Friedy

- mit Griff im Deckel und Filterauslassungen
- für 12 Instrumente und Zubehör
- Abmessungen: 268 x 176 x 34 mm

Farbe	Art.-Nr.
Rot	71046
Grau	71047
Orange	71049
Gelb	71050
Pink	71051
Blau	71052
Grün	71053

Sonderpreis statt ~~175,-~~
nur **€ 155,-**



Angebot:

Bei Kauf einer Container-Kassette erhalten Sie einen Everedge Scaler S204SD9 (Art.-Nr. 60890) im Wert von **€ 38,90 inklusive**.

Steril-Container-System, Aesculap

- die mittel- und langfristig preisgünstigste und sicherste Sterilverpackung
- hohe Lebensdauer
- einfacher und sicherer Transport
- keine wiederkehrenden Kosten für Verpackungsmaterialien

Steril-Container,

- 312 x 190 x 46 mm, (zur Aufnahme von Siebtray, Art.-Nr. 79291)
- Art.-Nr. 69869
Sonderpreis statt ~~156,90~~
nur **€ 152,-**

Steril-Container,

- 312 x 190 x 65 mm, (zur Aufnahme von Siebtray Art.-Nr. 82549)
- Art.-Nr. 71630
Sonderpreis statt ~~166,30~~
nur **€ 165,-**

Dauerfilter

- für mind. 1.000 Sterilisationen (Packung à 2 Stück)
- Art.-Nr. 24382
Sonderpreis statt ~~29,50~~
nur **€ 28,90**

(weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage)




Siebtray-System, Aesculap

- sichere und schonende Fixierung der Instrumente
- optimale Reinigungswirkung (unabhängig geprüft und bestätigt)
- einfache und flexible Handhabung
- höchste Zuverlässigkeit


Siebtray mit 3 Instrumentenstegen

- 273 x 176 x 30 mm, (passend in Steril-Container Art.-Nr. 69869),
 - geeignet für PA-Chirurgie, Mikrochirurgie oder Weichteilchirurgie
- Art.-Nr. 79291, Sonderpreis statt ~~134,70~~
nur **€ 132,-**

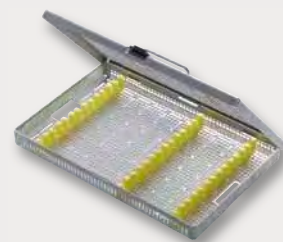

Siebtray mit 3 Instrumentenstegen

- 273 x 176 x 41 mm, (passend in Steril-Container Art.-Nr. 71630),
 - geeignet für OST-Siebe
- Art.-Nr. 82549, Sonderpreis statt ~~191,85~~
nur **€ 188,-**

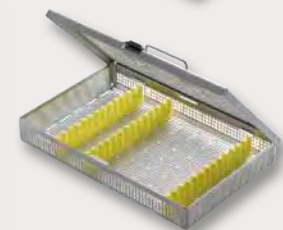

(weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage)

Angebot:

Bei Kauf eines Steril-Containers erhalten Sie eine Plombe (Art.-Nr. 202191) und ein Kennzeichenschild Ihrer Wahl im Gesamtwert von **€ 15,60 inklusive**.

Folien/Tüten

Sterilgutverpackung für die Dampfsterilisation mit Intrafilmindikatoren gem. DIN EN ISO 11607-1.

Produkt	Pckg.	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis
Folie	Rolle	200 m	50 mm	42942	€ 16,80
Folie	Rolle	200 m	75 mm	42943	€ 22,60
Folie	Rolle	200 m	100 mm	42944	€ 29,90
Folie	Rolle	200 m	150 mm	42954	€ 48,90
Folie	Rolle	200 m	210 mm	42955	€ 67,45
Folie	Rolle	200 m	250 mm	42957	€ 81,90
Tüten	500 Stk.	250 mm	55 mm	29033	€ 14,50
Tüten	500 Stk.	250 mm	75 mm	29242	€ 19,90
Tüten	1.000 Stk	250 mm	100 mm	42941	€ 41,50



Aktion 10 + 1:

Wählen Sie 11 Produkte aus dem hier angebotenen Folien- und Tütensortiment und wir schenken Ihnen das günstigste Produkt.

MELaseal Pro, Melag

Das **validierbare** Siegelgerät überwacht bei jedem Siegelvorgang die Einhaltung der Siegeltemperatur, Durchlaufgeschwindigkeit und Anpressdruck. Über die eingebaute Schnittstelle können die Parameter ausgedruckt und elektronisch archiviert werden.

Sonderpreis statt ~~1.890,-~~
nur € 1.795,-




Blue Line, Stericlin

Klarsichtsterilisiervpackungen

- geeignet für geschlossene Tray-Kassetten, Implantations-Sets oder größere Packeinheiten textiler Sterilgüter
- aufgedruckter Indikator (außerhalb des Füllbereichs)
- hohe Luft- und Dampfdurchlässigkeit

Rolle	Höhe	Breite	Art.-Nr.
100 m	65 mm	200 mm	204032

€ 99,-

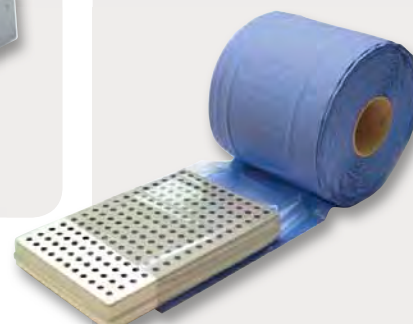

Hygopac, Dürr Dental

Durchlaufsigelgerät mit 9 mm Siegelnaht zur Verarbeitung von Papier-Folien-Sterilisationsverpackungen. Der automatische Durchlauf garantiert gleichbleibende und einwandfreie Nähte. Anpressdruck und Versiegelungstemperatur sind einstellbar.

Sonderpreis statt ~~912,-~~
nur € 875,-



DAC Universal Wrapped ready, Sirona

Ganz schnell – ganz sicher

Mit dem DAC Universal können jetzt auch verpackte Instrumente aufbereitet werden. Die Instrumente sind dann für Lagerung, Transport und invasive Anwendungen vor Rekontamination geschützt.

- Klasse-S Sterilisator
- validierbare Reinigung, Thermodesinfektor (DIN EN ISO 15883), Pflege und Sterilisation in nur 12 Minuten
- 3 Instrumente können nach der Aufbereitung im Standardprogramm mit einem Spezial-Deckel verpackt sterilisiert werden

Deckel für verpackte Instrumente

Zur Vermeidung einer Rekontamination können bis zu 3 Instrumente in einem Schnellprogramm verpackt sterilisiert werden.

Sonderpreis statt ~~890,-~~
nur € 760,-



~~6.390,-~~
€ 4.950,-

MELaseal 100+, Melag

Nach einer kurzen Aufwärmzeit können die Folien zuverlässig ohne Pausenzeiten zeitsparend hintereinander gesiegelt werden. Die Nahtbreite von 10 mm liegt deutlich über der Norm und gewährleistet zusätzliche Sicherheit.

€ 414,-




Möbel und Zubehör

Zero, Dental Art Hygiespendereinheit



~~1.880,-~~
€ 1.690,-

- Raumgestaltungselement und Vorratsschrank in Kombination
- Viertel- oder Halböffnung individuell wählbar
- automatische Sperrfunktion nach wenigen Sekunden
- Öffnungs- und Schließmechanismus mit zentraler Sensor-Touch Schnittstelle
- automatische Selbstjustage der Türschalen
- Türen können für die Bestückung, Reinigung und Pflege dauerhaft blockiert werden
- Stromanschluss 220V erforderlich
- in verschiedenen Farben erhältlich
- Durchmesser 70 cm, Tiefe 27 cm

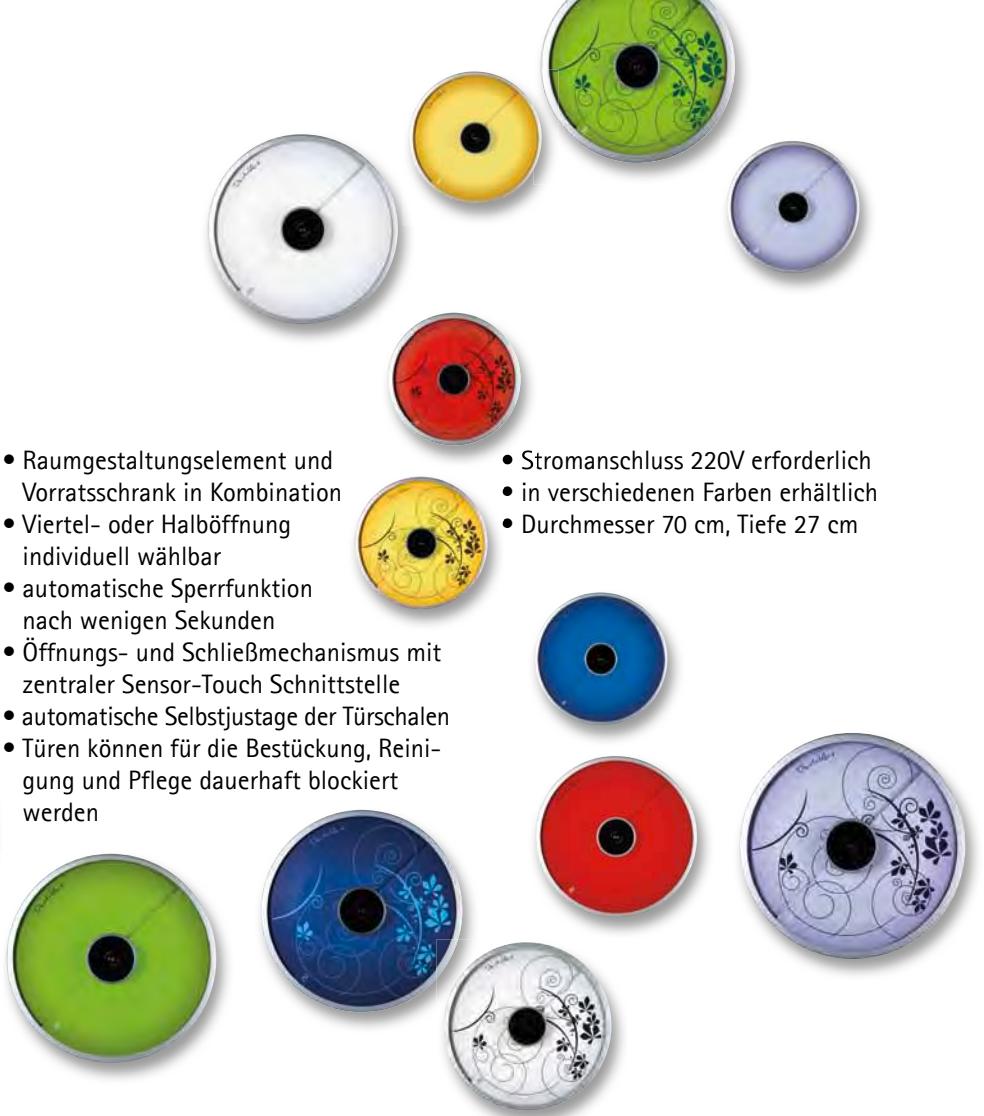

Hygienezeile, Dental Art

Die Ablaufplanung der hygienischen Prozesse im Sterilisationsraum ist ein wichtiger Bestandteil des Hygienekonzepts und erfordert eine systematische Planung.

Für optimales Arbeiten vom Eingang kontaminierter Instrumente

über die Aufbereitung und Lagerung steriler Medizinprodukte ermöglicht der modulare Aufbau der Designlinie AN von Dental Art die Anpassung an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Praxis.

Sonderpreis statt ~~9.850,-~~
nur € 8.650,-

(ohne die abgebildeten technischen Produkte und Einbaugeräte)



Seifenspender IT 1000AE Euro, Infracronic



- nahezu jedes Gebinde bis 1000 ml verwendbar
- kein Nachtropfen von Seife oder Desinfektionsmittel
- Maße: 335 mm (H) x 112 mm (B) x 116 mm (T)
- Edelstahlausführung
Art.-Nr. 203847

€ 279,-

Spendermodul SLIMLINE XS

Das Spendermodul beinhaltet 2 kontaktlose Spender für Seife und Desinfektionsmittel sowie eine Applikationshilfe für handelsübliche Falttuchpapiere.



- Maße: 420 mm (H) x 600 mm (B) x 215 mm (T)
- Für Spender IT 1000 AW EURO, weiß
- Korpus nach Muster-Dekorkarte
- Frontklappe Spiegel sowie farbige Lacobelgläser nach RAL-Musterprospekt mit eloxiertem Aluminiumrahmen

Sonderpreis statt ~~999,-~~
nur € 950,-

Dokumentation von Hygieneprozessen


Dokumentierte Sicherheit

Die gesetzlichen Bestimmungen der MP-BetriebV und RKI-Empfehlung beschreiben die Nachvollziehbarkeit der Aufbereitung von Medizinprodukten und die Dokumentation von kritisch relevanten Prozessparametern.

Auch wenn in Einzelfällen das regelmäßige Führen von handschriftlichen Protokollbüchern anerkannt wird, so stellt die automatisierte Protokollierung die sicherste Dokumentationsmethode dar. Hierfür bieten Software- und Kennzeichnungslösungen die Überwachung von Sterilisationsprozessen, Chargen-Kontrolle und -Dokumentation.

Melasoftware, Melag

Vollautomatische Chargen- und Prozessdokumentation

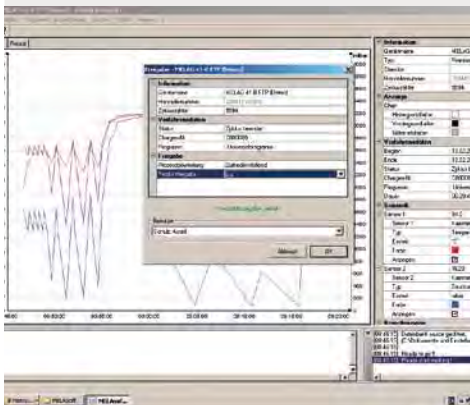

Die Dokumentationslösung Melasoft ermöglicht die einfache und zeitsparende Anbindung von Melag-Sterilisatoren, Reinigungs-, Desinfektions- und Siegelgeräten.

Für die patientenbezogene Rückverfolgung der verwendeten Instrumente verfügt Melasoft über Schnittstellen zu den verbreitetsten Praxis-Softwarepaketen.

Sonderpreis statt ~~735,-~~
€ 630,-

LisaWare, W&H

Die LisaWare-Software speichert direkt über eine serielle Schnittstelle oder über ein lokales LAN-Netzwerk alle Zyklusdaten der Lisa-Sterilisatoren.

- bis zu 4 Sterilisatoren vernetzbar
- aktueller Stand des Sterilisationszyklus permanent über ein Menüfenster des Bildschirms sichtbar

€ 390,-



LisaSafe, W&H

Fehlerlose Dokumentation



Das neue LisaSafe garantiert eine sichere Dokumentation für die unkomplizierte Rückverfolgbarkeit des sterilen Ladeguts in Verbindung mit Lisa-Sterilisatoren.

- direkter Anschluss des Ettikettendruckers an den Lisa-Sterilisator, ohne Computer
- manuelle oder automatische Druckoption
- erfüllt die Vorgaben des RKI

€ 1.190,-

MELAdoc, Melag

Häufig wird die Durchführung der Sterilisation lediglich in einem Tagebuch dokumentiert. Der MELAdoc-Etikettendrucker erleichtert und vereinfacht die Chargendokumentation und ermöglicht eine Chargenrückverfolgbarkeit.

Sterilisierdatum, Chargen-Nummer, freigebende Person, verwendeter Sterilisator und Haltbarkeitsdatum können auf eine einfache Weise den sterilisierten Instrumenten und dem Patienten zugeordnet werden.

Angebot:

MELAdoc, Melag
1 Stück inkl. 1 Ersatzrolle,
1 Farbwalze

Art.-Nr. 57919



Produkt	Pckg.	Art.-Nr.	Preis
MELAdoc Ersatzrollen	6 Rollen à 750 Etik.	59017	€ 30,95
MELAdoc Dokumentationsblätter	10 Blöcke	61207	€ 58,95
MELAdoc Dokumentationsblätter	Block	54568	€ 6,25

Mediboard, Hoffmann & Krippner GmbH

Die spritzwassergeschützte PC-Tastatur weist eine antimikrobielle Oberfläche auf und ist resistent gegen sämtliche gängigen Desinfektionsmittel.

- superflache Tastatur, optional mit Mousepad
- keine Installation erforderlich
- widerstandsfähig gegen Alkohol, verdünnte Säuren und Laugen, Haushaltsreiniger, Öle/Fette, etc.

€ 280,-



prodent consult- Qualitätsmanagement

Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein

Sie wollen dauerhaft ein hohes Qualitätsniveau sichern – und zwar nicht allein im Hygienebereich, sondern in der gesamten Praxis? Dann ist die Einführung eines Qualitätsmanagements (QM) der richtige Weg. Vorausgesetzt, das QM-System passt zu Ihrer Praxis und wird aktiv gelebt.

Denn ein QM-System „von der Stange“ oder gar nur die Anschaffung eines standardisierten QM-Handbuchs – womit Sie übrigens nicht einmal die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) erfüllen – bringen Sie keinen Schritt weiter.

Stoßen Sie jetzt die Weiterentwicklung Ihrer Praxis an

Beim prodent consult-Qualitätsmanagement liegt der Fokus im Verbesserungsmanagement. So ist gewährleistet, dass Ihr Qualitätsmanagement die Entwicklung Ihrer Praxis voranbringt.

Die Inhalte und Schwerpunkte des QM-Systems werden nach einem strategischen Analysegespräch (SWOT-Analyse) praxisindividuell festgelegt. Die anschließende Ausarbeitung des QM-Systems können Sie an Ihre QM-Beauftragte in der Praxis delegieren. Somit bleibt Ihr persönliches zeitliches Involvement für die Einrichtung des QM-Systems insgesamt beschränkt.

Informationen:

Nähere Infos erhalten Sie bei Ihrem Pluradent-Fachberater oder bei prodent consult von **Frau Anja Schaal** unter Tel. 0 69/82 99-442.

Sichern Sie sich Fördermittel!

Nutzen Sie den zusätzlichen prodent consult-Vorteil: Für die Einführung eines QM-Systems durch die prodent consult GmbH können Fördermittel u.a. aus dem Europäischen Sozialfonds beantragt werden, im Einzelfall bis zur Höhe von 50% der Beratungskosten. Den Antrag stellt prodent consult für Sie.

Punktebewertung

Für die Einführung des prodent consult Qualitätsmanagements erhalten Sie außerdem 26 Fortbildungspunkte (ggf. mehr).

Qualitätsmanagement schnell umgesetzt

Mit Hilfe von prodent consult und Dürr Dental Qualitätsmanagement setzen Sie und Ihr Team die Anforderungen der QM-Richtlinie nach G-BA um.

- 2,5 Tage Schulung in Ihrer Praxis
- Schulung der Hygiene- und QM-Beauftragten
- SWOT-Analyse einer zukünftigen Praxisentwicklung
- Softwaretraining QM-Guide
- Einführung des Job- und Termin-Organizers
- Gedrucktes QM-Handbuch und QM-Zertifikat

€ 3.180,-



Literaturhinweise

Aufbereitung von Medizinprodukten

Die Aufbereitung von Medizinprodukten, das ist neben Reinigung, Desinfektion und Sterilisation auch Inspektion, Wartung, Reparatur, Transport und vieles mehr. Diesem komplexen und anspruchsvollen Thema widmet sich dieses Buch. Es enthält deshalb Informationen zu Rechtsgrundlagen, Anforderungen an die Qualifikation des Personals sowie an die Räumlichkeiten und deren

Ausstattung. Außerdem werden notwendige Hygienemaßnahmen sowie die Probleme bei der Benutzung von schwer oder nicht aufbereitbaren Instrumenten dargestellt.

Detailliert wird das Thema Qualitätssicherung sowie Validierung und Standardisierung behandelt. Dieses Buch stellt damit eine Sammlung von Grundlagen, Praxistipps,

Handlungsanleitungen sowie Lösungsansätzen dar, ob für Anwender, Hygienefachkraft, Validierer oder auch kontrollierenden Behördenvertreter.

Aufbereitung von Medizinprodukten

- Autor: Michael Kremmel
- Verlag: Books on Demand GmbH
- ISBN 978-3-8370-0650-6
- Auflage: 2. überarbeitete Auflage 2008
- Seiten: 220 Seiten

€ 19,90 (inkl. 7% MwSt., rein netto)



Praktische Hygiene in der Zahnmedizin

Leitfaden zur Umsetzung in Praxis und OP mit CD-ROM

Das bewährte Standardwerk für niedergelassene Zahnmediziner, unverzichtbar in der Praxis! Für die kostenbewusste und rechtssichere Anwendung der aktuellen Vorschriften. Mit Umsetzungshilfen und fachspezifischen Hygienevorgaben.

- Abfallentsorgung
- Qualitätsmanagement
- Hygienisch-mikrobiologische Kontrollen
- Infektionsschutz für das Personal
- Behördliche Überwachung
- Hygienepläne

- Spezielle Hygienemaßnahmen in der Kieferorthopädie, Parodontologie, Implantologie, Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie

Aus dem Inhalt:

- Rechtliche Grundlagen
- Mikrobiologische Grundlagen
- Standardhygienemaßnahmen
- Reinigung und Desinfektion
- Personalkleidung und Wäschemanagement
- Wundversorgung
- Hygiene im zahnärztlichen OP
- Hygiene in der Anästhesie
- Medizinprodukteaufbereitung
- Antibiotika in der Zahnmedizin

Praktische Hygiene in der Zahnmedizin

- Autoren: Zinn, G; Rössler, R.; Weidenfeller, P.
- Verlag: Zapf Media Group GmbH & Co. KG
- ISBN-13: 9783938999059
- ISBN-10: 3938999055
- Auflage: 2006
- Seiten: 200 S., Abb.

€ 89,00 (inkl. 7% MwSt., rein netto)



Und was können wir noch für Sie tun?

Das Pluradent Leistungsspektrum:

- **Wegweisende Konzepte**
Bauen Sie mit uns Ihr Behandlungsspektrum durch eine erfolgreiche Positionierung gezielt aus.
- **Attraktive Raumkonzepte**
Planung, Innenarchitektur, Design und Kommunikation – bringen Sie mit uns Ergonomie und Gestaltung Ihrer Praxis in Einklang.
- **Vielseitige Fortbildungsangebote**
Pflegen Sie Kontakte und nutzen Sie die Impulse unserer Seminare, Fortbildungen und Symposien.
- **Professionelle Praxisgründung & -übergabe**
Diskret abgeben, erfolgreich gründen – profitieren Sie von unserer Erfahrung und Professionalität.
- **Zuverlässiger Technischer Service**
Sichern Sie die umfassende Verfügbarkeit Ihrer Einrichtung durch Instandsetzung, Wartung und Notfallmanagement.
- **Ganzheitliche Beratung**
Qualitätsmanagement, Abrechnungssystematik, Prozesse und Praxismarketing – schöpfen Sie mit uns die Potenziale Ihrer Praxis voll aus.
- **Optimale Produkte**
Treffen Sie mit uns die richtige Entscheidung für Ihren gesamten Materialeinkauf.
- **Individuelle Netzwerklösungen**
Hard- und Software, IT-Netzwerke, Digitale Praxis – schaffen Sie mit uns einen funktionalen und funktionierenden Workflow.

Faxanfrage: Free-Fax 0800/8 29 83 33

Ich bitte um Rückruf meines Pluradent Fachberaters zum Thema: (Bitte ankreuzen)

- Wasseraufbereitung
- Reinigen und Pflegen
- Instrumentenpakete
- Infektionsprävention für Patient und Behandlungsteam
- Instrumentenaufbereitung in der Zahnarztpraxis
- Möbel und Zubehör
- Dokumentation von Hygieneprozessen
- prodent consult-Qualitätsmanagement

Ansprechpartner

Telefonnummer/Durchwahl

Rückrufwunsch am/um

Stempel/Unterschrift:

Kundennummer:

Pluradent Niederlassungen in Ihrer Nähe

PLZ 0

Pluradent Dresden

Hansa Zentrum
Fritz-Reuter-Straße 32 • 01097 Dresden
Tel.: 03 51/79 52 66-0 • Fax: 03 51/79 52 66-29
E-Mail: dresden@pluradent.de

Pluradent Görlitz

Am Flugplatz 18 • 02828 Görlitz
Tel.: 03 58 81/40 54 54 • Fax: 03 58 81/40 94 36
E-Mail: goerlitz@pluradent.de

Pluradent Cottbus

Leipziger Straße 45b • 03048 Cottbus
Tel.: 03 55/3 83 36-24 • Fax: 03 55/3 83 36-25
E-Mail: cottbus@pluradent.de

Pluradent Halle

Adam-Kuckhoff-Straße 39 • 06108 Halle
Tel.: 03 45/2 98 41-3 • Fax: 03 45/2 98 41-40
E-Mail: halle@pluradent.de

Pluradent Jena

Carl-Zeiß-Straße 1 • 07743 Jena
Tel.: 0 36 41/82 96-48 • Fax: 0 36 41/82 96-49
E-Mail: jena@pluradent.de

Pluradent Chemnitz

Röhrsdorfer Allee 14 • 09247 Chemnitz-Röhrsdorf
Tel.: 0 37 22/51 74-0 • Fax: 0 37 22/51 74-10
Free-Fax: 0800/5 17 48 00
E-Mail: chemnitz@pluradent.de

PLZ 1

Pluradent Berlin

Potsdamer Straße 187 • 10783 Berlin
Tel.: 0 30/23 63 65-0 • Fax: 0 30/23 63 65-12
Free-Fax: 0800/23 63 80-0
E-Mail: berlin@pluradent.de

Pluradent Greifswald

Walther-Rathenau-Straße 9-11 • 17489 Greifswald
Tel.: 0 38 34/7 98 90-0 • Fax: 0 38 34/7 98 90-3
Free-Fax: 0800/9 45 53 36
E-Mail: greifswald@pluradent.de

Pluradent Rostock

Schillerstraße 18 • 18055 Rostock
Tel.: 03 81/4 91 14-0 • Fax: 03 81/4 91 14-30
Free-Fax: 0800/9 45 53 35
E-Mail: rostock@pluradent.de

Pluradent Waren

Heinrich-Seidel-Straße 6 • 17192 Waren/Müritz
Tel.: 0 39 91/64 38-0 • Fax: 0 39 91/64 38-25
E-Mail: waren@pluradent.de

PLZ 2

Pluradent Hamburg

Bachstraße 38 • 22083 Hamburg
Tel.: 0 40/32 90 80-0 • Fax: 0 40/32 90 80-10
Free-Fax: 0800/9 45 53 34
E-Mail: hamburg@pluradent.de

Pluradent Lübeck

Rapsacker 7 • 23556 Lübeck
Tel.: 04 51/8 79 95-0 • Fax: 04 51/8 79 95-40
Free-Fax: 0800/9 45 53 33
E-Mail: luebeck@pluradent.de

Pluradent Kiel

Wall 55/SELL-Speicher • 24103 Kiel
Tel.: 04 31/3 39 30-0 • Fax: 04 31/3 39 30-16
E-Mail: kiel@pluradent.de

Pluradent Flensburg

Liebigstraße 14 • 24941 Flensburg
Tel.: 04 61/9 03 34-0 • Fax: 04 61/9 81 65
Free-Fax: 0800/9 03 34 00
E-Mail: flensburg@pluradent.de

Pluradent Leer

Am alten Handelshafen 2
(2. OG) • 26789 Leer
Tel.: 04 91/9 29 98-0 • Fax: 04 91/9 29 98-50
Free-Fax: 0800/9 45 53 37
E-Mail: leer@pluradent.de

Pluradent Bremen

Paul-Feller-Straße 19 • 28199 Bremen
Tel.: 04 21/3 86 33-0 • Fax: 04 21/3 86 33-33
Free-Fax: 0800/9 34 37 36
E-Mail: bremen@pluradent.de

PLZ 3

Pluradent Hannover

Karl-Wiechert-Allee 66 • 30625 Hannover
Tel.: 05 11/5 44 44-6 • Fax: 05 11/5 44 44-700
Free-Fax: 0800/5 44 44-50
E-Mail: hannover@pluradent.de

Pluradent Bielefeld

Altenburger Straße 9 • 33699 Bielefeld
Tel.: 05 21/9 22 98-0 • Fax: 05 21/9 22 98-22
E-Mail: bielefeld@pluradent.de

Pluradent Kassel

Richard-Roosen-Straße 10 • 34123 Kassel
Tel.: 05 61/58 97-0 • Fax: 05 61/58 97-111
Free-Fax: 0800/58 97-111
E-Mail: kassel@pluradent.de

Pluradent Marburg

Krummbogen 14 • 35039 Marburg
Tel.: 0 64 21/6 10 06 • Fax: 0 64 21/6 69 08
E-Mail: marburg@pluradent.de

Pluradent Braunschweig

Frankfurter Straße 226 • 38122 Braunschweig
Tel.: 05 31/2 42 38-0 • Fax: 05 31/4 66 02
Free-Fax: 0800/4 66 02 00
E-Mail: braunschweig@pluradent.de

Pluradent Magdeburg

Am Fuchsberg 4 • 39112 Magdeburg
Tel.: 03 91/7 31 12-35/36 • Fax: 03 91/7 31 12-39
Free-Fax: 0800/7 31 12-39
E-Mail: magdeburg@pluradent.de

PLZ 4

Pluradent Dortmund

Kapitelwiese 7 • 44263 Dortmund
Tel.: 02 31/94 10 47-0 • Fax: 02 31/43 39-22
Free-Fax: 0800/4 89 46 53
E-Mail: dortmund@pluradent.de

Pluradent Düsseldorf

Airport Business Center • Franz-Rennefeld-Weg 4
40472 Düsseldorf
Tel.: 02 11/22 97 52-0 • Fax: 02 11/22 97 52-29
E-Mail: duesseldorf@pluradent.de

Pluradent Osnabrück

Ackerstraße 55 • 49084 Osnabrück
Tel.: 05 41/9 57 40-0 • Fax: 05 41/9 57 40-80
Free-Fax: 0800/0 48 94 65
E-Mail: osnabrueck@pluradent.de

PLZ 5

Pluradent Bonn

Stiftsplatz 1-3 • 53111 Bonn
Tel.: 02 28/7 26 35-0 • Fax: 02 28/7 26 35-55
Free-Fax: 0800/7 26 35-00
E-Mail: bonn@pluradent.de

Pluradent Mainz

Augustusplatz 5 • 55131 Mainz
Tel.: 0 61 31/57 17 34 • Fax: 0 61 31/57 33 41
E-Mail: mainz@pluradent.de

PLZ 6

Pluradent Offenbach

Kaiserleistraße 3 • 63067 Offenbach
Tel.: 0 69/8 29 83-0 • Fax: 0 69/8 29 83-271
Free-Fax: 0800/8 29 83 33
E-Mail: offenbach@pluradent.de

Pluradent Wiesbaden

Weidenbornstraße 8a • 65189 Wiesbaden
Tel.: 06 11/36 17-0 • Fax: 06 11/36 17-46
E-Mail: wiesbaden@pluradent.de

Pluradent Homburg/Saar

Poststraße 1 • 66424 Homburg
Tel.: 0 68 41/6 70-51 • Fax: 0 68 41/6 70-53
E-Mail: homburg@pluradent.de

Pluradent Mannheim

Mallaustraße 59 • 68219 Mannheim
Tel.: 06 21/8 79 23-0 • Fax: 06 21/8 79 23-29
E-Mail: mannheim@pluradent.de

PLZ 7

Pluradent Stuttgart

Vor dem Lauch 15 • 70567 Stuttgart
Tel.: 07 11/25 25 56-0 • Fax: 07 11/25 25 56-29
Free-Fax: 0800/25 25 56-0
E-Mail: stuttgart@pluradent.de

Pluradent Karlsruhe

Unterweingartenfeld 6 • 76135 Karlsruhe
Tel.: 07 21/86 05-0 • Fax: 07 21/86 52-63
Free-Fax: 0800/86 058-00
E-Mail: karlsruhe@pluradent.de

Pluradent Konstanz

Robert-Bosch-Straße 18 • 78467 Konstanz
Tel.: 0 75 31/98 11-0 • Fax: 0 75 31/98 11-33
E-Mail: konstanz@pluradent.de

Pluradent Freiburg

Engelbergerstraße 21 • 79106 Freiburg
Tel.: 07 61/4 00 09-0 • Fax: 07 61/4 00 09-33
E-Mail: freiburg@pluradent.de

PLZ 8

Pluradent München

Neumarkter Straße 63 • 81673 München
Tel.: 0 89/46 26 96-0 • Fax: 0 89/46 26 96-19
Free-Fax: 0800/46 26 96-9
E-Mail: muenchen@pluradent.de

Pluradent Augsburg

Lise-Meitner-Straße 4 • 86156 Augsburg
Tel.: 08 21/4 44 99-90 • Fax: 08 21/4 44 99-99
E-Mail: augsburg@pluradent.de

Pluradent Kempten

Sandstraße 8 • 87439 Kempten
Tel.: 08 31/5 23 55-0 • Fax: 08 31/5 23 55-49
E-Mail: kempten@pluradent.de

Pluradent Ulm

Einsteinstraße 55 • 89077 Ulm
Tel.: 07 31/9 74 13-0 • Fax: 07 31/9 74 13-80
Free-Fax: 0800/8 60 58 00
E-Mail: ulm@pluradent.de

PLZ 9

Pluradent Nürnberg

Ostendstraße 156 • 90482 Nürnberg
Tel.: 09 11/9 54 75-0 • Fax: 09 11/9 54 75-23
Free-Fax: 0800/8 29 83 33
E-Mail: nuernberg@pluradent.de

Pluradent Erfurt

Fichtenweg 6 • 99198 Erfurt-Kerspleben
Tel.: 03 62 03/6 17-0 • Fax: 03 62 03/6 17-13
E-Mail: erfurt@pluradent.de

