

# Checkliste Dentaltechnik

Nutzen Sie die Tipps dieser Checkliste, und optimieren Sie die Hygiene, Verfügbarkeit und Funktion der Dentalgeräte Ihrer Praxis während Betriebsunterbrechungen oder vorübergehender Nichtnutzung einzelner Geräte.

<b>Geräte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ggf. Wartungen oder Reparaturen an Geräten organisieren</li> <li><input type="checkbox"/> ggf. Geräte oder Instrumente zur Reparatur schicken</li> </ul>
<b>Pulverstrahl-Geräte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ausspülen und Wasserzulauf trennen</li> <li><input type="checkbox"/> Pulver entfernen, Handstücke reinigen</li> </ul>
<b>Zahnstein-Entfernungsgeräte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ausspülen und Wasserzulauf trennen</li> <li><input type="checkbox"/> ZEG-Spitzen und Handstücke demontieren und aufbereiten</li> </ul>
<b>Autoklav/Sterilisator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wasser abstellen</li> <li><input type="checkbox"/> Speicherkarte auslesen</li> </ul>
<b>DAC-Universal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wasser und Druckluft abstellen</li> </ul>
<b>RDG (Thermodesinfektor/Melatherm)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ggf. Gerät 1 x leer laufen lassen, Filtersiebe reinigen</li> <li><input type="checkbox"/> ggf. Speicherkarte auslesen</li> <li><input type="checkbox"/> Wasser abstellen</li> </ul>
<b>Instrumenten-Pflegegeräte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Druckluft abstellen</li> <li><input type="checkbox"/> Gerät reinigen, wischdesinfizieren</li> </ul>
<b>Behandlungseinheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ggf. Wasserentkeimungsmittel bestellen</li> <li><input type="checkbox"/> Filtersiebe reinigen/erneuern</li> <li><input type="checkbox"/> mit entsprechenden Mitteln durchsaugen, zum abschluß mit viel Wasser saugen Polster</li> <li><input type="checkbox"/> reinigen und mit Pflegemittel einreiben</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Entkeimungsprogramm starten</b></li> <li><input type="checkbox"/> Fremdgeräteanschlüsse abklemmen</li> <li><input type="checkbox"/> Gerät ausschalten</li> </ul>
<b>Saugmaschine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Filtersiebe reinigen ggf. erneuern</li> </ul>
<b>Kompressor, Power-Tower</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ausschalten</li> </ul>
<b>Amalgamabscheider (Zentral)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Filtersiebe reinigen</li> </ul>
<b>Röntgenfilm-Entwickler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ggf. neue Chemikalien für den Wechsel nach dem Urlaub bestellen</li> </ul>
<b>Entkalkungsanlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Herstellerangaben beachten</li> </ul>

<b>Praxislabor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wasser abstellen, Druckluft abstellen</li> <li><input type="checkbox"/> Gasflaschen zudrehen</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> angebrochene Materialien verbrauchen</li> <li><input type="checkbox"/> ggf. neue bestellen</li> <li><input type="checkbox"/> Flächen reinigen/desinfizieren</li> <li><input type="checkbox"/> angebrochene Materialien entsorgen</li> </ul>
<b>Elektrik/Strom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> wenn vorhanden: Magnetventil für Hauptwasser-Unterbrechung überprüfen</li> <li><input type="checkbox"/> ggf. Antennen-Stecker ziehen</li> </ul>
<b>Wasser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Absperrwirkung an den Behandlungseinheiten überprüfen</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Bottle-Systeme: Desinfektionsflüssigkeiten einspülen</b></li> </ul>
<b>EDV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ggf. Updates organisieren</li> <li><input type="checkbox"/> Stecker ziehen an den PCs, WLAN abschalten</li> <li><input type="checkbox"/> Umgang mit Server klären (ggf. nicht abstellen)</li> </ul>
<b>Individuelle Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Anrufbeantworter besprechen</li> <li><input type="checkbox"/> Abwesenheitsdaten aushängen</li> </ul> <p>.....</p> <p>.....</p>

## Vor dem Verlassen der Praxis

<b>Elektrik/Strom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> wenn vorhanden: Hauptschalter ausschalten</li> </ul>
<b>Wasser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Hauptwasserhahn zudrehen (nicht bei automatischen Spüleinrichtungen)</li> </ul>

## Während einer Betriebsunterbrechung

<b>Wasser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Um eine Verkeimung der Wasserleitungen zu verhindern ist es sinnvoll diese zwischenzeitig zu spülen (mindestens 1x wöchentlich)! Hierzu alle Zapfstellen (Waschbecken) in der Praxis für ca. 1 Minute öffnen, ggf. Hygieneprogramme an den Behandlungseinheiten durchführen.</b></li> </ul>
---------------	--

